


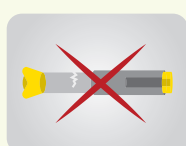


شرایط نگهداری


- فیزیوجکت را در یخچال در دمای ۲-۸ درجه سانتی‌گراد و دور از دید و دسترس کودکان نگه دارید.
- از قرار دادن فیزیوجکت در معرض نور مستقیم خورشید خودداری کنید.
- فیزیوجکت برای تزریق یک دوز دارو است و تنها برای یک بار تزریق قابل استفاده است.
- از تکان دادن شدید فیزیوجکت خودداری کنید.
- قبل از مصرف، تاریخ انقضا درج شده بر روی فیزیوجکت را چک کنید.
- فیزیوجکت را گرم نکنید و از فریز کردن آن جدا خودداری کنید.
- بهتر است همیشه فیزیوجکت را در بسته‌بندی اصلی دارو نگهداری کنید.




آماده‌سازی قبل تزریق

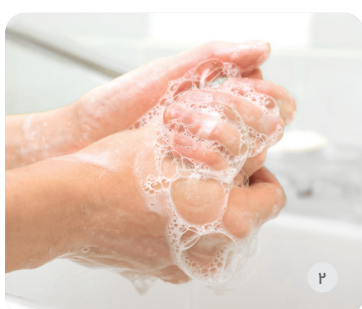

۲ دست‌های خود را به‌خوبی با آب و صابون بشوید.

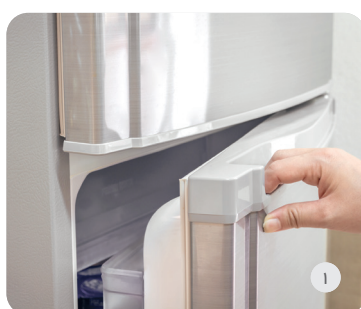

۱ فیزیوجکت را از یخچال خارج کرده و مدتی صبر کنید تا با محیط هم دما شود.

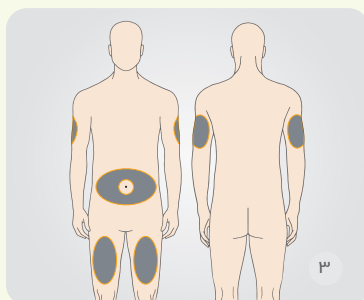

۲ بهترین نواحی برای تزریق عبارتند از: شکم با فاصله ۵ سانتی‌متری از ناف، یک سوم میانی بخش پشتی و خارجی بازو، سطح رویی ران از ۵ سانتی‌متر پایین‌تر از کشاله ران تا ۵ سانتی‌متر بالاتر از زانو.

انتخاب محل تزریق

مراحل تزریق



۵ قسمت نگهدارنده فیزیوجکت را طبق تصویر با دست نگه دارید و از دست دیگر خود برای برداشتن درپوش دستگاه استفاده کنید. درپوش دستگاه را به صورت مستقیم از روی دستگاه برداشته و از پیچاندن آن خودداری کنید. تنها پیش از تزریق، درپوش دستگاه را بردارید. به محض برداشتن درپوش، تزریق باید انجام گیرد.



۴ محل تزریق را با پنبه الکلی به صورت دورانی از داخل به خارج ضدعفونی کنید. اجازه دهید الکل با جریان هوا خشک گردد. از فوت کردن محل تزریق خودداری نمایید.



۸ با شنیدن صدای کلیک، تزریق شما آغاز می‌گردد. دستگاه را تا پایان تزریق با فشار مناسب و با اطمینان از عدم خروج سوزن، به مدت ۱۰ ثانیه همان جا نگه دارید. توجه داشته باشید که اعمال فشار بر روی پوست هیچ گونه تأثیری بر میزان درد در تزریق ندارد، از این جهت نگران نباشید.



۷ دکمه فوقانی زرد رنگ بالای دستگاه را با انگشت شست فشار دهید.



۶ سرم‌متحرک دستگاه را با زاویه ۹۰ درجه به صورت عمودی تا حدی بر روی پوست فشار دهید که قسمت شفاف دستگاه کاملاً فشرده شود. تا زمانی که فشار مناسب به پوست اعمال نگردد دستگاه عمل نمی‌کند.

۹ روند تزریق را از طریق قسمت شفاف دستگاه کنترل کنید تا مطمئن شوید دوز کامل تزریق شده است. دستگاه را با یک حرکت مستقیم از محل تزریق خارج کنید.

مراحل پس از تزریق



۱۱ دستگاه استفاده شده را دور بیندازید.



۱۰ پس از اتمام تزریق، محل تزریق را با پنبه خشک بپوشانید. خروج مختصری خون یا دارو از محل تزریق بلامانع می‌باشد. تزریق زیرجلدی ممکن است باعث درد زودگذر و یا کبودی اندکی در ناحیه تزریق شود.

در صورتی که به هر دلیل تزریق با موفقیت انجام نشد در اسرع وقت با پزشک یا داروساز خود یا مرکز حمایت از بیمار شرکت سیناژن (ارکیدلایف) تماس حاصل فرمایید. به یاد داشته باشید این دستگاه برای تزریق راحت توسط خودتان طراحی شده است، اما برای تزریق بار اول، آموزشهای لازم را از پزشک، داروساز یا پرستار خود درخواست کنید. همچنین میتوانید برای دریافت آموزش رایگان تزریق در مراکز ارکیدلایف با شماره ۴۲۵۹۳-۰۲۱ تماس بگیرید.

هنگام برداشتن درپوش زرد رنگ فیزیوجکت، از هرگونه پیچش و انحرافی به درپوش اکیدا خودداری نمایید. کوچکترین پیچش و انحراف منجر به خرابی فیزیوجکت (ابزار دارورسان خودکار) می‌شود.

درپوش زرد رنگ باید کاملاً مستقیم و بدون پیچاندن کشیده شود.

توجه
توجه

